

ZOLL AED PLUS Trainer2 培训机/训练机

ZOLL AED Plus® Trainer2:



按下可打开 Trainer2。
重新按下可开始当前情形
(根据选择使用远程控制器)。
按下并按住可关闭 Trainer2。



绿灯保持打开 = Trainer2 打开, 准备供使用。
绿灯关闭 = Trainer2 关闭, 或者没有电池电量。
红灯稳定 = 接受远程控制器发出的最后命令。
红灯 3 闪烁 = 远程控制器发出的最后命令无效。

1

设置和测试

Trainer2 装置:

操作:

在 AED Plus Trainer2 中安装 4 节 “D” 碱电池。



按**开/关**按钮打开 Trainer2。

绿灯打开, 表示 Trainer2 准备就绪。

远程控制器:

操作:



在手持式远程控制器中安装 2 节 “AA” 电池。
按**查看/进入**按钮打开远程控制器。



将远程控制器指向装置, 然后重新按**查看/进入**按钮。
远程控制器上的绿灯将显示选择了手动情形模式

手动情形模式
查看/进入按钮

Trainer2 装置:

操作:



关闭 Trainer2 装置 (向下按住**开/关**按钮)。

设置测试现已完成。Trainer2 装置和远程控制器准备供使用。

注意 远程控制器灯表示 Trainer2 模拟实际 AED Plus 行为时的当前培训设置。

2

选择情形设置

Trainer2 装置:



操作:

按**开/关**按钮打开 Trainer2。

远程控制器:



操作:

按**查看/进入**按钮一次打开远程控制器。



使用**上移**按钮选择所需的情形。



使用 **CPR 节拍器开/关**按钮为此情形打开或关闭 Real CPR Help®（发出嘟嘟声）。



按**查看/进入**按钮一次将选定的培训情形传输到 Trainer2 装置。

注意 远程控制器将在 10 秒之后自动关闭。远程控制器将记住最后的情形设置，在下次按**查看/进入**按钮时将重新显示此设置。

3

情形控制装置

远程控制器：

操作：

分析 - VF



VF（心室颤动-建议除颤）是手动模式下默认的模拟心律。

对于导致不建议除颤的下一次分析，请按**不除颤**按钮。

注意 按下“不除颤”按钮之后，下一次模拟的心脏分析将不建议除颤。对于下一次分析，不能恢复此设置。



在所有情形中，必须一下按**电极片**按钮才能继续进行分析。如果重新按下该按钮，将开始提示连接电极片。

3a

CPR 提示

讲师使用远程控制器控制培训情形的 CPR 期时的提示。讲师可以使用下面的按钮模拟使用 AED Plus 除颤器和 Real CPR Help。

远程控制器：

操作：



用力按压按钮

在 CPR 期间按此按钮可导致 Trainer2 发出用力按压语音提示。讲师应在学员的胸部按压太浅时按下此按钮。



按压良好按钮

在 CPR 期间按此按钮可导致 Trainer2 发出按压良好语音提示。讲师应在学员通过提高胸部按压深度响应用力按压提示时按下此按钮，以便为学员提供积极的反馈。

注意 准确地模仿学员的 AED Plus 装置需要讲师熟悉 AED Plus 当前遵循的、适用于用力按压和按压良好提示的协议。

控制装置/指示器

手持式远程控制器：

手持式远程控制器上线条上方的按钮为设置控制装置，讲师可使用这些按钮选择培训场景（选定情形旁边的 LED 灯）。线条下方的按钮为培训控制装置，讲师可使用这些按钮将事件引入培训情形。

设置控制装置：



查看/进入情形

显示当前选择的情形（按一次）
开始情形（重新按下）



上移至下移情形。



CPR 节拍器开/关按钮

使 CPR 节拍器为选定的培训情形发出嘟嘟声。按钮上方的 LED 亮起，表示 CPR 节拍器已启用。您应在 CPR-D padz® 连接到 Trainer2 时启用 CPR 节拍器。



当培训情形中出现一次 CPR 期时，CPR 节拍器开始按每分钟 60 次按压 (CPM) 的频率发出嘟嘟声，然后在几秒之后自动加快至 100 CPM。节拍器发出嘟嘟声与学员实际的压缩率无关，而且持续发出嘟嘟声，直至 CPR 间隔结束或讲师结束情形。



手动情形模式



情形 1：除颤 - 除颤



情形 2：不除颤 - 除颤









情形 3：除颤 - 不除颤



情形 4：不除颤 - 不除颤

-  **手动情形模式**
-  **情形 1：除颤 - 除颤**
-  **情形 2：不除颤 - 除颤**
-  **情形 3：除颤 - 不除颤**
-  **情形 4：不除颤 - 不除颤**

培训控制装置：

-  **电极板已连接/未连接到受害人裸露的胸部**
(切换开关)。
-  **在下一次心脏分析时不建议除颤**
(仅限手动模式)。
-  **用力按压提示**
(仅当 CPR 节拍器正在发出嘟嘟声时)。
-  **按压良好提示**
(仅当 CPR 节拍器正在发出嘟嘟声时)。
-  **暂停 (继续) 当前情形。**
-  **结束当前情形。**

Trainer2 装置：



操作：

用力按压和**按压良好**按钮仅在 CPR 间隔期间有效。如果提示当前有效，Trainer2 状态窗口上的红灯发出一次长时间的闪烁。



如果在 Trainer2 没有发出嘟嘟声时按下**用力按压**或**按压良好**按钮，装置的红灯快速发出三次闪烁，表示提示当前无效。

3b 暂停/结束情形

远程控制器：

操作：



在所有情形（手动和自动）中，可以通过按**暂停/继续**按钮一次暂停营救。第二次按此按钮可继续情形。



在所有情形（手动和自动）中，可以通过按**结束**按钮一次结束营救。

注意 有关临床 AED Plus 功能的更多信息，请参阅 AED Plus 操作员指南和管理员指南。